

CONSELHOS PARA UTILIZADORES DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA COM SUSPEITA OU DIAGNÓSTICO DE INFEÇÃO POR CORONAVIRUS

- 1.** Durma num quarto separado do seu cônjuge, acompanhante ou cuidador, para além de todas as medidas de isolamento e higiene recomendadas.
- 2.** Cumpra a sua terapia como recomendado pelo seu médico prescriptor e contacte a VitalAire para podermos coordenar o tratamento com o seu médico e adaptar às suas novas necessidades.
- 3.** Avise os técnicos especializados da VitalAire acerca da sua situação.
- 4.** Mediante a informação do seu médico poderá ser necessário fazer algumas adaptações para evitar a dispersão de partículas pelo ambiente e evitar o contágio de pessoas que vivam consigo.
- 5.** Procure ajustar bem a máscara sem que o(a) magoe, para evitar as fugas o máximo possível.
- 6.** Maximize as medidas de higiene diária do equipamento, lavando a máscara e circuito com água e sabão e/ou uma solução desinfetante, deixando secar por completo.
- 7.** Promova um adequado arejamento do quarto onde fez o tratamento, assim como limpeza das superfícies onde coloca o equipamento.